

Duplicador

Português

Indicações

Duplicação de modelos protéticos nas fundições de cromo-cobalto.

Apresentações

Pote plástico de 1000g.

Características/Benefícios

- Possui alto poder de cópia;
- Permite maior aproveitamento devido à excelente fluidez;
- Poder ser reciclado adicionando-se água até atingir a fluidez desejada;
- Pode ser derretido em banho-maria, equipamento próprio ou micro-ondas;
- Não forma resíduos, mantendo a qualidade e translucidez inicial;
- Mantém suas propriedades após vários ciclos e rende muito.

Composição

Água
Agar-Agar
Glicerina
Antiespumante
Conservantes

Instruções de Uso

Cortar o DuplicaPro em pequenos pedaços e levar ao fogo, sem deixar ferver. Deixar esfriar até cerca de 50°C e verter na mufla, tomando o cuidado prévio de enxugar o modelo de gesso, anteriormente mergulhando em água. Após verter, deixar esfriar até endurecer, para preencher com revestimento.



Advertências e Precauções

- Lavar bem após o uso e quando estiver grosso, acrescentar água;
- Mantenha o frasco fechado.

Validade

2 anos a partir da data de fabricação.

Produto declarado isento de cadastro pelo Ministério da Saúde.

Potência do Forno (Watts)	Ciclo no Micro-ondas	
	500g de Duplicador	1000g de Duplicador
500	5min. 100% + 3 min. 50%	7 min. 100% + 6 min. 50%
800	3min. 100% + 4 min. 20%	5 min. 100% + 4 min. 50%
900	3min. 100% + 3 min. 50%	4 min. 100% + 4 min. 50%
1200	2min. 100% + 1 min. 20%	3 min. 100% + 3 min. 50%
1400	2min. 100% + 1 min. 20%	3 min. 100% + 2 min. 50%



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Rua Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contatos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br