

Isolante

Português

Indicações

Líquido para isolamento de gesso em trabalhos protéticos.

Apresentações

Frascos de 100ml, 250ml, 500ml e 1l.

Características/Benefícios

- Para uso nas técnicas convencional e micro-ondas;
- De fácil aplicação devido à sua viscosidade, permite fluidez e secagem rápida, com ótimas propriedades isolantes;
- A espessura do filme é adequada, não causando alterações dimensionais.

Composição

Alginato de Sódio
Conservantes
Água

Instruções de Uso**Agite antes de usar.**

Usar modelo de gesso previamente hidratado. Na aplicação, utilize sempre um pincel limpo cobrindo toda a superfície isolada, com cuidado para não atingir a parte posterior dos dentes. Quando fizer uso de filme separador na primeira prensagem, retire-o, recorte o excesso e aplique o isolante IsoPro. Efetuar o isolamento com a mufla a 40°C.

Advertências e Precauções

- Manter o frasco fechado;
- Conservar ao abrigo de luz e calor;
- Manter fora do alcance das crianças;
- Evitar contato com a pele e com os olhos;
- Não contaminar o frasco com resíduos de gesso;
- Não inflamável;
- Se houver irritação, procure um médico;
- Se houver contato com os olhos, lave com água em abundância;
- Se ingerido acidentalmente, beber água e não provocar vômito. Procurar auxílio médico.

**Validade**

2 anos a partir da data de fabricação.

Produto declarado isento de cadastro pelo Ministério da Saúde.

