



Indicado para confecção de prótese dentária parcial ou total, removível ou fixa, overdentures, coroas ou pontes.

Modelos

Anteriores superiores e inferiores:

2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 3P, A23, A25, A26, 263, 264, 266, 2P, 38

Posteriores superiores e inferiores:

30M, 32M, 30L, 32L, 34L

Cores

60,62,66,67,69

Características e benefícios

- 2 camadas
- Modelário Americano
- Fabricado com matérias primas selecionadas
- Pigmentos biocompatíveis
- Fluorescência
- Aspecto natural
- Simetria e detalhes
- Estabilidade de cores
- Melhor adesão à base

Composição

- Polimetilmetacrilato
- EGDMA
- Fluorescente
- Pigmentos biocompatíveis

Instruções de uso

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.

Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, tirar o brilho da base do dente com uma ferramenta abrasiva. Após isolamento e antes da aplicação de resina, limpar a base dos dentes com um anti desengordurante.

Recomendações ao paciente

Para aumentar a durabilidade dos dentes é recomendada uma higienização diária sem o uso de substâncias agressivas como ácidos e álcalis.

Advertências e precauções

- Conservar ao abrigo de luz e calor
- Somente para uso odontológico

Utilize a tabela de articulação do ACRIDENT

ARTICULAÇÕES			
Anteriores Superiores / Inferiores		Posteriores Superiores / Inferiores	
2D	2D	30M - 30L	30M - 30L
3D	3D	30M - 32M	30M - 32L
3M	3M	30M	30M
2N	2N	30L	30L
3N	3N	32M / 30L	32M / 30L
3P	3P	32M / 32L	32M / 32L
A23	3M - A23	30M	30M
A25	A25	32M / 32L	32M / 32L
A26	A26	32M / 32L	32M / 32L
263	2N - 263	30M / 30L	30M / 30L
264	264	32M / 32L	32M / 32L
266	266	34L	34L
2P	2P	32L / 34L	32L / 34L
38	38	34L	34L

Validade

06 anos a partir da data de fabricação.

Registro da ANVISA

80750420001

Químico Responsável

José Guilherme Pacheco Andrade
CRQ IV 04223586

Fone: (19) 3562.7433

Fax: (19) 3563.2666

sac@protetic.com.br