

Dentes Acrílicos

Português

Indicação

Confecção de prótese dentária parcial ou total, removível ou fixa, overdentures, coroas ou pontes.

Modelos

Anteriores superiores e inferiores: E2, E3, E4, F4, G3, H3, H4, L2, L4, O31, O32, O36, R11, R12, R13, R14, R17, R66, T21, T22, T25, T44, T4B, L1, L3, L5, L7, L10, K6, K10, K12.

Posteriores superiores e inferiores: M2, M3, M4, M5, M6.

Cores

1A, 2A, 1C, 1E, 3E, 1D, 2B, 4A, 4B.

Características e Benefícios

- 3 camadas;
- Modelário Europeu;
- Alta durabilidade;
- Fabricado com matérias primas selecionadas;
- Pigmentos biocompatíveis;
- Fluorescência;
- Aspecto natural;
- Simetria e detalhes;
- Estabilidade de cores;
- Melhor adesão à base;
- Melhor oclusão;

Composição

- Polimetilmetacrilato
- EGDMA
- Fluorescente
- Pigmentos biocompatíveis

Instruções de Uso

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.

Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, tirar o brilho da base do dente com uma ferramenta abrasiva. Após isolamento e antes da aplicação de resina, limpar a base dos dentes com desengordurante.



Recomendações ao Paciente

Para aumentar a durabilidade dos dentes é recomendada uma higienização diária sem o uso de substâncias agressivas como ácidos e álcalis.

Advertências e Precauções

- Conservar ao abrigo de luz e calor
- Somente para uso odontológico

Utilize a tabela de articulação do PRIMELUX

ARTICULAÇÕES	
Anteriores Superiores / Inferiores	Posteriores Superiores / Inferiores
E 2	L 5
E 3	K 6
E 4	L 5
F 4	K 10 - L 10
G 3	K 6
H 3	L 3
H 4	L 3
L 2	K 6
L 4	K 12 - K 10
O 31	L 5
O 32	L 3
O 36	L 7
R 11	L 1
R 12	L 5
R 13	L 5
R 14	L 7
R 17	K 10
R 66	L 5
T 21	L 3
T 22	L 3
T 25	L 10
T 44	L 3
T 4B	L 5
	M2
	M4
	M4 - M6
	M4 - M6
	M4
	M3
	M5
	M4
	M4 - M6
	M3
	M3
	M3
	M4 - M6
	M6
	M5
	M3
	M3 - M5
	M4
	M3 - M5
	M2



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Rua Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contatos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br

Validade

06 anos a partir da data de fabricação.

Registro ANVISA

80750420001

Responsável Técnico

José Guilherme Pacheco Andrade
CRQ IV 04223586



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Rua Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contatos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br