

Bloco Calcinável

Português

Indicações

Apropriado para confecção de guias cirúrgicas, base de prótese, coroas provisórias unitárias ou múltiplas, elementos calcináveis, com alta qualidade, ideal para fundição, resistência com alta dureza.

Contra Indicações

Restaurações feitas de blocos de PMMA não devem ser usadas em caso de sensibilidade conhecida ao metilmetacrilato (MMA) ou ao peróxido de benzoíla.

O material não é adequado para a fabricação de prótese dentária fixa de cantiléver, embutidos de prótese dentária fixa, endodônticos ou implantes endósseos. Além disso, o material não é adequado para próteses parciais fixas com três ou mais pânticos vizinhos.

Os materiais de PMMA não devem ser utilizados na presença de sintomas clínicos de bruxismo ou de espaço insuficiente disponível.

Embalagem

1 peça

Modelos e Dimensões

BPS: 16mm

Cores

Clear e Red

Características/Benefícios

- OMC (Cerâmica Organicamente Modificada);
- Dupla Liga Cruzada (DLC);
- Excelente usinabilidade;
- Biocompatibilidade;
- Alta estabilidade de cores.

Composição

Polimetilmetacrilato
Peróxido de Benzoíla
Pigmentos Biocompatíveis
EDMA
Fluorescente



Instruções de Uso

BlockPro é usado na técnica de usinagem para confecção de coroas e pontes, como provisórios de longa duração, cimentados ou parafusados, padrões de fundição e injeção de cerâmica e bases de próteses – usinados por Sistema CAM de diversos fabricantes.

Fixe o bloco na máquina seguindo as instruções do fabricante do equipamento.

Após a usinagem, retire o bloco do equipamento e remova o elemento do bloco.

Para acabamento do trabalho confeccionado, utilize fresas, lixas e borrachas. Para o polimento e brilho, utilize escova macia e flanela.

Limites

Posterior

Bloco Calcinável: considerar as indicações do material a ser utilizado – metal (fundição), cerâmica prensada etc.

Espessura Mínima: 1mm oclusal e 0,6mm cervical
Diâmetros mínimos de conexão: Anterior: 3,6mm;
Posterior: 4,4mm

O provisório pode ser fixado com todos os cimentos para fixação provisória. Cimentos



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Rua Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contatos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br

Bloco Calcinável

Português

provisórios com Eugenol podem diminuir a eficácia de cimentos resinosos.

Recomendações ao Paciente

Para aumentar a durabilidade da prótese, recomenda-se a higiene diária sem o uso de substâncias agressivas, como ácidos ou álcalis.

Advertências e Precauções

- Produto médico de uso único. Uso somente por profissionais da área odontológica capacitados em operar sistemas CAD/CAM;
- Evitar superaquecimento durante usinagem e acabamento;
- A poeira criada durante a usinagem pode causar irritação aos olhos, pele e vias respiratórias. Recomenda-se uso de equipamento de proteção individual, como máscara e óculos;
- A estrutura deve ser limpa e desinfetada antes de ser colocada na boca do paciente.

Validade

10 anos a partir da data de fabricação.

Registro ANVISA

80750429006

Responsável Técnico

José Guilherme Pacheco Andrade
CRQ IV - 04223586



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Rua Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contatos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br