

Binder 28%

Português

Indicações

Binder Pro é utilizado para preparo de líquido de mistura para revestimento à base de quartzo.

Apresentação

Frasco de 1 litro.

Composição

Silicato de etilo, álcool etílico e polissilicatos.

Instruções de Uso

Em um recipiente misturar o binder com álcool e só depois, lentamente, colocar o reator, misturando constantemente. Agitar até esquentar.

Advertências e Precauções

- Líquido e vapores inflamáveis.
- Provoca irritação ocular grave.
- Nocivo se inalado.
- Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- Mantenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes.
- Não fume.
- Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis.
- Use luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.



- **ARMAZENE EM LOCAL BEM VENTILADO, AOABRIGO DE LUZ E CALOR. MANTENHA O RECIPIENTE HERMETICAMENTE FECHADO.**

Validade

18 meses a partir da data de fabricação.



Registro ANVISA

Produto isento de registro pelo Ministério da Saúde.

Responsável Técnico

José Paulo Rocha Pereira Pinto
CRQ IV - 04365163

