

Sistema de clareamento dental profissional

Português

Indicações

WhiteningPro 35% é um sistema de clareamento dental profissional à base de Peróxido de Hidrogênio 35% para clareamento de dentes vitais e não-vitais, de uso exclusivo em consultório odontológico.

Apresentação

Kit contendo 01 Seringa de Peroxido de 1,2g + 01 Seringa de Espessante de 0,4g.

Composição

Agente: Peróxido de hidrogênio e estabilizante.

Espessante: Água purificada, glicerina, fluoreto de sódio, trietanolamina e corante.

Instruções de Uso

Deve sempre ser utilizado com um eficiente sistema de isolamento para a proteção gengival (barreira gengival fotopolimerizável). Após a mistura homogênea das duas fases, ocorre a formação de um gel à base de Peróxido de Hidrogênio a 35%, com pH na faixa 6.0 a 7.0. O pH neutro evita e diminui efeitos na estrutura dental, além disso **WhiteningPro 35%** contém agentes dessensibilizantes em sua fórmula que maximizam o conforto do paciente.

Advertências e Precauções

- Promover uma anamnese detalhada do paciente antes de iniciar o tratamento;
- Manipular o produto apenas em um consultório odontológico, utilizando luvas e óculos de proteção;
- Evitar o contato do gel com tecidos moles e gengiva;
- O produto não é recomendado para pessoas que tenham feito recentemente cirurgia de gengiva ou com inflamação do tecido gengival e pessoas com alergia a qualquer um de seus componentes.
- Não é recomendado o uso durante a gravidez e lactação.
- Produto de uso exclusivo em consultório odontológico sob supervisão de um profissional;



- Produto não estéril;
- Ler as instruções de uso antes de utilizar o produto;
- Não utilizar após a data de validade;
- Não ingerir e evitar o contato com a pele.
- A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar náuseas.
- Antes do início do tratamento, informe seu paciente sobre a possibilidade de ocorrer sensibilidade dental. Normalmente é comum ocorrer sensibilidade dental durante o tratamento do clareamento. Neste caso, se persistir a sensibilidade trate os dentes com o gel dessensibilizante dessensibilizante 0,2% indicado para sensibilidade moderada a baixa ou gel dessensibilizante dessensibilizante 2% indicado para sensibilidade moderada a alta.
- **MANTER O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM SEMPRE FECHADA.**
- **PROTEGER DA INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR DIRETA.**
- **ARMAZENE O PRODUTO EM TEMPERATURAS DE 5°C A 28°C.**

Validade

18 meses a partir da data de fabricação.

Registro ANVISA: 80750420008

Responsável Técnico

José Paulo Rocha Pereira Pinto
CRQ IV - 04365163



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Rua Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contatos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br

Sistema de Blanqueamiento Dental Profesional

Español

Indicaciones

WhiteningPro 35% es un sistema de blanqueamiento dental profesional a base de Peróxido de Hidrógeno al 35% para blanquear dientes vitales y no vitales, para uso exclusivo en consultorio dental.

Presentación

Kit que contiene 01 jeringa de peróxido de 1,2 g + 01 jeringa de espesante de 0,4 g.

Composición

Agente: Peróxido de hidrógeno y estabilizador.

Espesante: Agua purificada, glicerina, fluoruro de sodio, trietanolamina y colorante.

Instrucciones de Uso

Siempre se debe utilizar con un sistema de aislamiento eficiente para la protección gingival (barrera gingival fotopolimerizable). Después de mezclar homogéneamente las dos fases, se forma un gel a base de peróxido de hidrógeno al 35%, con un pH en el rango de 6,0 a 7,0. El pH neutro previene y reduce los efectos sobre la estructura dental, además WhiteningPro 35% contiene agentes desensibilizantes en su fórmula que maximizan el confort del paciente.

Advertencias y Precauciones

- Requerir un historial detallado del paciente antes de iniciar el tratamiento;
- Manipule el producto únicamente en el consultorio odontológico, utilizando guantes y gafas protectoras;
- Evite el contacto del gel con tejidos blandos y encías;
- El producto no está recomendado para personas recientemente sometidas a una cirugía de encías o con inflamación del tejido gingival y personas con alergia a alguno de sus componentes.
- No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.
- Producto para uso exclusivo en consultorio odontológico bajo la supervisión de un profesional;
- Producto no estéril;



- Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el producto;
- No utilizar después de la fecha de vencimiento;
- No ingerir y evitar el contacto con la piel.
- La ingestión de grandes cantidades del producto puede provocar náuseas.
- Antes de iniciar el tratamiento, informe a su paciente sobre la posibilidad de sensibilidad dental. Suele ser común experimentar sensibilidad dental durante el tratamiento de blanqueamiento. En este caso, si la sensibilidad persiste, tratar los dientes con gel desensibilizante al 0,2% indicado para sensibilidad moderada a baja, el gel desensibilizante al 2% indicado para sensibilidad moderada a alta.

- **MANTENER EL PRODUCTO EN SU EMBALAJE SIEMPRE CERRADO.**
- **PROTEGER DE LA LUZ SOLAR DIRECTA.**
- **ALMACENAR EL PRODUCTO A TEMPERATURAS ENTRE 5°C Y 28°C.**

Validez

18 meses desde la fecha de fabricación.

Registro ANVISA

80750420008

Gerente Técnico

José Paulo Rocha Pereira Pinto
CRQ IV - 04365163



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Calle Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contactos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br