

Gel Clareador Dental para Uso Caseiro

Português

Indicações

WhiteningPro é indicado para clareamento de dentes vitais com base na técnica de clareamento dental de uso caseiro supervisionado pelo dentista.

Apresentações

WhiteningPro 10%

Embalagem contendo 01 Seringa de 3g.
Embalagem contendo 03 Seringas de 3g.

WhiteningPro 16%

Embalagem contendo 01 Seringa de 3g.
Embalagem contendo 03 Seringas de 3g.

WhiteningPro 22%

Embalagem contendo 01 Seringa de 3g.
Embalagem contendo 03 Seringas de 3g.

Composição

Peróxido de carbamida, hidróxido de sódio, espessante, fluoreto de sódio, glicerol, nitrato de potássio e água deionizada.

Instruções de Uso

Limpe a superfície dental. Com a superfície dental higienizada, pressione o êmbolo da seringa aplicando o gel clareador no compartimento da moldeira dos elementos dentais que serão tratados. Coloque a moldeira na boca de forma que encaixe nos dentes e que o gel sobreponha a superfície dental. Remova o excesso do gel da superfície dental com auxílio dos dedos higienizados, algodão, escova macia, lenço higiênico e/ou água em abundância. Após o tratamento retire a moldeira. Enxague a moldeira e a boca com água em abundância para remoção total do gel. Lave e seque a moldeira antes e após a utilização. Guarde a moldeira no porta-moldeira.

Advertências e Precauções

- Este é um produto que deve ser sempre indicado e supervisionado por um dentista;
- Antes do início do tratamento, informe seu paciente sobre a possibilidade de ocorrer sensibilidade dental;



- O produto não deve ser usado por grávidas e/ou lactantes e em pacientes menores de 14 anos;
- Evite a ingestão proposital e excessiva do produto;
- Não utilizar em pacientes com qualquer sensibilidade aos componentes deste produto.
- Pacientes com históricos alérgicos aos componentes desta formulação devem consultar um especialista antes de iniciar o tratamento;
- Evite fumar durante o período do tratamento e não fume imediatamente depois de retirada a moldeira;
- Durante o tratamento o paciente deverá evitar a ingestão de bebidas, frutas e produtos ácidos, assim evitará a sensibilidade;
- Evite consumir, durante o tratamento, produtos que contenham corantes fortes como: café, chocolate, refrigerantes, vinhos, beterraba etc., com o intuito de não comprometer o processo do clareamento.
- Aconselhe a seu paciente retornar ao consultório para acompanhamento do tratamento após uma semana (7dias), com o intuito de avaliar e garantir a efetividade dos resultados do clareamento dental até o final do tratamento;
- Se ocorrer algum problema, interrompa o tratamento e comunique ao seu dentista;
- Mantenha sempre afastado do calor e/ou luz solar.
- Se um grande volume de produto for ingerido acidentalmente, procure ajuda médica;
- Produto não injetável. Não reutilize a embalagem.
- A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar náuseas.
- Antes do início do tratamento, informe seu



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Rua Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contatos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br

Gel Clareador Dental para Uso Caseiro

Português

paciente sobre a possibilidade de ocorrer sensibilidade dental. Normalmente é comum ocorrer sensibilidade dental durante o tratamento do clareamento dental. Neste caso se persistir a sensibilidade trate os dentes com o gel dessensibilizante 0,2% indicado para sensibilidade moderada a baixa ou gel dessensibilizante 2% indicado para sensibilidade moderada a alta.

- Excesso de gel na moldeira pode deixar uma leve irritação no tecido gengival, por isso, remova sempre o excesso conforme manual de instruções do paciente.

- **MANTER O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM SEMPRE FECHADA.**
- **PROTEGER DA INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR DIRETA.**
- **ARMAZENE O PRODUTO EM TEMPERATURAS DE 5°C A 28°C.**

Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Registro ANVISA

80750420012

Responsável Técnico

José Paulo Rocha Pereira Pinto
CRQ IV - 04365163



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Rua Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contatos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br

Gel Blanqueador Dental para Uso Doméstico

Español

Indicaciones

WhiteningPro está indicado para blanquear dientes vitales basándose en la técnica de blanqueamiento dental de uso doméstico supervisado por un dentista.

Presentaciones

Blanqueamiento Pro 10%

Envase que contiene 01 jeringa de 3 g.

Envase que contiene 03 jeringas de 3 g.

Blanqueamiento Pro 16%

Envase que contiene 01 jeringa de 3 g.

Envase que contiene 03 jeringas de 3 g.

Blanqueamiento Pro 22%

Envase que contiene 01 jeringa de 3 g.

Envase que contiene 03 jeringas de 3 g.

Composición

Peróxido de carbamida, hidróxido de sodio, espesante, fluoruro de sodio, glicerol, nitrato de potasio y agua desionizada.

Instrucciones de uso

Limpiar la superficie del diente. Con la superficie dental higienizada, presionar el émbolo de la jeringa aplicando el gel blanqueador en el compartimento de la cubeta de los elementos dentales a tratar. Coloque la cubeta en su boca de manera que se ajuste a sus dientes y el gel se superponga a la superficie del diente. Retire el exceso de gel de la superficie del diente con ayuda de los dedos limpios, un algodón, un cepillo suave, papel sanitario y/o abundante agua. Después del tratamiento, retire la bandeja. Enjuague la cubeta y la boca con abundante agua para eliminar completamente el gel. Lave y seque la bandeja antes y después de su uso. Guarde la bandeja en el soporte para bandejas.

Advertencias y Precauciones

- Este es un producto que siempre debe ser recomendado y supervisado por un dentista;
- Antes de iniciar el tratamiento, informe a su paciente sobre la posibilidad de sensibilidad dental;



- El producto no debe ser utilizado por mujeres embarazadas y/o en período de lactancia ni en pacientes menores de 14 años;
- Evite la ingestión intencionada y excesiva del producto;
- No utilizar en pacientes con sensibilidad a los componentes de este producto.
- Los pacientes con antecedentes de alergia a los componentes de esta formulación deben consultar con un especialista antes de iniciar el tratamiento;
- Evite fumar durante el período de tratamiento y no fume inmediatamente después de retirar la cubeta;
- Durante el tratamiento, el paciente debe evitar la ingestión de bebidas, frutas y productos ácidos, evitando así la sensibilidad;
- Durante el tratamiento evitar consumir productos que contengan colorantes fuertes como: café, chocolate, refrescos, vinos, remolacha, etc. Para no comprometer el proceso de blanqueamiento.
- Aconseje a su paciente que regrese al consultorio para monitorear el tratamiento después de una semana (7 días), con el fin de evaluar y garantizar la efectividad de los resultados del blanqueamiento dental hasta el final del tratamiento;
- Si ocurre algún problema, suspenda el tratamiento e informe a su dentista;
- Mantener siempre alejado del calor y/o la luz solar.
- Si accidentalmente se ingiere una gran cantidad de producto, busque ayuda médica;
- Producto no inyectable. No reutilice el embalaje.
- La ingestión de grandes cantidades del producto puede provocar náuseas.
- Antes de iniciar el tratamiento, informe a su



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Calle Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contactos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br

Gel Blanqueador Dental para Uso Doméstico

Español

paciente sobre la posibilidad de sensibilidad dental. Suele ser común experimentar sensibilidad dental durante el tratamiento de blanqueamiento dental. En este caso, si la sensibilidad persiste, tratar los dientes con gel desensibilizante al 0,2% indicado para sensibilidad moderada a baja, el gel desensibilizante al 2% indicado para sensibilidad moderada a alta.

- El exceso de gel en la cubeta puede provocar una ligera irritación en el tejido de las encías, por lo que aconseja retirar siempre el exceso según el manual de instrucciones.
- **MANTENER EL PRODUCTO EN SU EMBALAJE SIEMPRE CERRADO.**
- **PROTEGER DE LA LUZ SOLAR DIRECTA.**
- **ALMACENAR EL PRODUCTO A TEMPERATURAS ENTRE 5°C Y 28°C.**

Validez

24 meses desde la fecha de fabricación.

Registro ANVISA

80750420012

Gerente Técnico

José Paulo Rocha Pereira Pinto
CRQ IV - 04365163



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Calle Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contactos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br