

Pasta de Polimento Diamantada

1/2

Ficha Técnica

Polimento Universal

Português

Indicações

Pasta de Polimento é indicada para ser utilizada em conjunto com discos de feltro ou discos aveludados, o que potencializa sua ação no polimento e acabamento em superfícies de materiais restauradores em geral.

Apresentação

Embalagem contendo 01 Seringa de 2,5g.

Composição

Hidróxido de sódio, glicerina, espessante, pó de diamante, água deionizada, fluoreto de sódio.

Instruções de Uso

A **Pasta de Polimento** oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores. **Pasta de Polimento** é uma pasta de polimento universal. Aplique utilizando um disco de feltro ou disco aveludado.

Advertências e Precauções

- Utilize rotação baixa, exercendo pouca pressão sobre os discos de feltro, com toques intermitentes e em movimentos circulares, evitando-se assim o aquecimento excessivo da superfície dental.
- Durante a aplicação do produto é recomendada a utilização de óculos de segurança
- pelo profissional.
- Não utilizar em pacientes com qualquer sensibilidade aos componentes deste produto.
- Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas.
- **MANTER O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM SEMPRE FECHADA.**
- **PROTEGER DA INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR DIRETA.**
- **ARMAZENE O PRODUTO EM TEMPERATURAS DE 5°C A 28°C.**



Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Registro ANVISA

80750420010

Responsável Técnico

José Paulo Rocha Pereira Pinto
CRQ IV - 04365163



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Rua Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contatos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br

Indicaciones

La **Pasta de Pulido** se recomienda para su uso en conjunto con discos de fieltro o discos aterciopelados, lo que potencializa su acción en el pulido y acabado de superficies de materiales restauradores en general.

Presentación

Envase que contiene 01 jeringa de 2,5g.

Composición

Hidróxido de sodio, glicerina, espesante, polvo de diamanto, agua desionizada, fluoruro de sodio.

Instrucciones de Uso

La Pasta de Pulido ofrece excelentes resultados en el pulido y brillo de porcelana, esmalte dental, resinas, composites y otros materiales restauradores. La pasta de pulido es una pasta de pulido universal.

Aplicar con un disco de fieltro o un disco aterciopelado.

Advertencias y Precauciones

- Utilice una rotación baja, ejerciendo poca presión sobre los discos de fieltro, con toques intermitentes y movimientos circulares, evitando así un calentamiento excesivo de la superficie del diente.
- A la hora de aplicar el producto se recomienda el uso de gafas de seguridad.
- No utilizar en pacientes con sensibilidad a los componentes de este producto.
- Suspender el uso del producto en caso de reacciones alérgicas.
- **MANTENER EL PRODUCTO EN SU EMBALAJE SIEMPRE CERRADO.**
- **PROTEGER DE LA LUZ SOLAR DIRECTA.**
- **ALMACENAR EL PRODUCTO A TEMPERATURAS ENTRE 5°C Y 28°C.**

Validez

24 meses desde la fecha de fabricación.



Registro ANVISA

80750420010

Gerente Técnico

José Paulo Rocha Pereira Pinto
CRQ IV - 04365163



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Calle Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contactos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br