

Indicações

O **Ácido Gel Fluorídrico** é utilizado no condicionamento ácido de porcelanas e peças protéticas com o intuito de facilitar e aprimorar a ancoragem mecânica, obtendo assim uma melhor adesão.

Apresentação

Embalagem contendo 01 Seringa de 3g.

Concentração:

5% e 10%

Composição

Água destilada, carbômero ultragel, ácido fluorídrico e pigmento vermelho.

Instruções de Uso

Isole a superfície externa da porcelana, metal ou composto híbrido. Condicione a superfície isolada com o condicionador ácido fosfórico por 1 minuto. Lave abundantemente e seque completamente. Aplique o silano e seque a superfície (seguir as instruções do fabricante do silano). Faça a cimentação da peça protética utilizando o cimento resinoso de sua preferência.

Advertências e Precauções

- Utilizar óculos de proteção durante a utilização do produto;
- Não deve entrar em contato com os tecidos moles, esmalte, dentina, olhos e pele. Caso haja contato lavar imediatamente com água em abundância;
- Seguir a legislação vigente para descarte de produtos odontológicos.
- Somente para uso profissional.
- **MANTER O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM SEMPRE FECHADA.**
- **PROTEGER DA INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR DIRETA.**
- **ARMAZENE O PRODUTO EM TEMPERATURAS DE 5°C A 28°C.**



Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Registro ANVISA

80750420014

Responsável Técnico

José Paulo Rocha Pereira Pinto
CRQ IV - 04365163



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Rua Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contatos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br

Indicaciones

El **Gel de Ácido Fluorhídrico** se utiliza en el acondicionamiento ácido de porcelana y piezas protésicas con el fin de facilitar y mejorar el anclaje mecánico, obteniendo así una mejor adhesión.

Presentación

Envase que contiene 01 jeringa de 3g.

Concentración

5% y 10%

Composición

Agua destilada, carbómero ultragel, ácido fluorhídrico y pigmento rojo.

Instrucciones de uso

Aísle la superficie exterior del composite de porcelana, metal o híbrido. Acondicione la superficie aislada con el acondicionador de ácido fosfórico durante 1 minuto. Lavar bien y secar completamente. Aplicar el silano y secar la superficie (siga las instrucciones del fabricante del silano). Cemente la parte protésica utilizando el cemento resinoso de su elección.

Advertencias y precauciones

- Utilice gafas protectoras cuando utilice el producto;
- No debe entrar en contacto con tejidos blandos, esmalte, dentina, ojos y piel. Si hay contacto, lavar inmediatamente con abundante agua;
- Seguir la legislación vigente para la eliminación de productos dentales.
- Sólo para uso profesional.



- **MANTENER EL PRODUCTO EN SU EMBALAJE SIEMPRE CERRADO.**
- **PROTEGER DE LA LUZ SOLAR DIRECTA.**
- **ALMACENAR EL PRODUCTO A TEMPERATURAS ENTRE 5°C Y 28°C.**

Validez

24 meses desde la fecha de fabricación.

Registro ANVISA

80750420014

Gerente Técnico

José Paulo Rocha Pereira Pinto
CRQ IV - 04365163



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Calle Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contactos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br