

### Adesivo Ortodôntico Fotopolimerizável

Português

#### Indicações

**FixPro** é indicado para adesão de bráquetes na superfície dental (esmalte) para tratamentos ortodônticos.

#### Apresentação

Embalagem contendo 01 Seringa de 3g.

#### Composição

UDMA, hidroxietil metacrilato fosfatado, Bis-GMA, TegDMA, sílica nanométrica, vidro alumínio borossilicato, fluoreto de sódio, caforquinona e amina.

#### Instruções de Uso

Preparar a superfície dental para a adesão, isolando a área, limpando e deixando o local seco. Aplicar o condicionador de ácido fosfórico na região aonde o braquete será aderido e deixar agir por pelo menos 30 segundos. Lavar a superfície com água e secar (garantir que a superfície esteja bem seca). Aplicar o adesivo ortodôntico na base do braquete. Posicionar o braquete na superfície do dente e pressionar (quanto mais fina a camada entre o dente e o braquete melhor a adesão). Retirar os excessos do cimento. Fotopolimerizar o cimento por pelo menos 40 segundos.

#### Advertências e Precauções

- Evite aplicar o produto na gengiva do paciente que tenha passado recentemente por algum tipo de procedimento cirúrgico bucal ou que tenha qualquer tipo de irritação gengival.
- A incompleta polimerização do produto ou o tempo excessivo podem levar a uma leve irritação gengival em alguns casos.
- **MANTER O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM SEMPRE FECHADA.**
- **PROTEGER DA INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR DIRETA.**
- **ARMAZENE O PRODUTO EM TEMPERATURAS DE 5°C A 28°C.**



#### Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

#### Registro ANVISA

80750429011

#### Responsável Técnico

José Paulo Rocha Pereira Pinto  
CRQ IV - 04365163



**PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME**

Rua Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contatos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br

### Adhesivo de Ortodoncia Fotopolimerizable

*Español*

#### Indicaciones

**FixPro** está indicado para la adhesión de brackets a la superficie dental (esmalte) para tratamientos de ortodoncia.

#### Presentación

Envase que contiene 01 jeringa de 3g.

#### Composición

UDMA, metacrilato de fosfato de hidroxietilo, Bis-GMA, TegDMA, sílice nanométrica, vidrio de borosilicato de aluminio, fluoruro de sodio, alcanforquinona y amina.

#### Instrucciones de Uso

Prepare la superficie del diente para la adhesión aislando el área, limpiando y dejando el área seca. Aplicar el acondicionador de ácido fosfórico en la zona donde se adherirá el bracket y dejar actuar al menos 30 segundos. Lave la superficie con agua y séquela (asegúrese de que la superficie esté seca). Aplique adhesivo de ortodoncia a la base del bracket. Coloque el bracket sobre la superficie del diente y presione (cuanto más fina sea la capa entre el diente y el bracket, mejor será la adhesión. Retire el exceso de cemento. Polimerice ligeramente el cemento durante al menos 40 segundos.

#### Advertencias y Precauciones

- Evite aplicar el producto en las encías de pacientes que hayan sido sometidos recientemente a algún tipo de procedimiento quirúrgico bucal o que presenten algún tipo de irritación de encías.
- La polimerización incompleta del producto o el tiempo excesivo pueden provocar en algunos casos una leve irritación de las encías.
- **MANTENER EL PRODUCTO EN SU EMBALAJE SIEMPRE CERRADO.**
- **PROTEGER DE LA LUZ SOLAR DIRECTA.**
- **ALMACENAR EL PRODUCTO A TEMPERATURAS ENTRE 5°C Y 28°C.**



#### Validez

24 meses desde la fecha de fabricación.

#### Registro ANVISA

80750429011

#### Gerente Técnico

José Paulo Rocha Pereira Pinto  
CRQ IV - 04365163



**PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME**

Calle Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contactos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br