

Selante de Fóssulas e Fissuras Fotopolimerizável

Português

Indicações

O **SealPro** foi desenvolvido para ser aplicado em dentes posteriores de geometrias complexas com o intuito de evitar o acúmulo de resíduos de alimentos, prevenindo com isso o surgimento de cáries.

Apresentação

Embalagem contendo 01 Seringa de 3g.

Composição

Hidroxietil metacrilato fosfatado, Bis-GMA, TegDMA, TMPTMA, sílica nanométrica silanizada, ionômero de vidro silanizado, vidro flúor-alumínio-silicato, caforoquinona, óxido de titânio e amina.

Instruções de Uso

Limpar a superfície oclusal, localizar as fóssulas e fissuras. Isolar (absoluto ou relativo) o local a ser selado com dique de borracha ou outro método adequado de isolamento. Realizar o condicionamento ácido no local a ser aplicado o produto. Lave o local com água em abundância e seque a superfície onde o selante será aplicado. Dispensar o selante diretamente sobre a superfície oclusal a ser selada. Caso necessário utilizar um pincel para estender o selante evitando-se áreas de interferência oclusal. Fotopolimerizar cada superfície selada por 20 segundos. Avaliar novamente os contatos oclusais.

Advertências e Precauções

- A incompleta polimerização do produto ou o tempo excessivo podem levar a uma leve irritação gengival em alguns casos.
- O produto tem monômeros de metacrilato que podem causar reações alérgicas ou irritações leves a pacientes sensíveis a estas substâncias.
- Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas.
- **MANTER O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM SEMPRE FECHADA.**
- **PROTEGER DA INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR DIRETA.**



- **ARMAZENE O PRODUTO EM TEMPERATURAS DE 5°C A 28°C.**

Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Registro ANVISA

80750429009

Responsável Técnico

José Paulo Rocha Pereira Pinto
CRQ IV - 04365163



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Rua Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contatos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br

Sellador Fotopolimerizable de Fosas y Fisuras

Español

Indicaciones

SealPro fue desarrollado para ser aplicado en dientes posteriores con geometrías complejas con el fin de evitar la acumulación de residuos de alimentos, previniendo así la aparición de caries.

Presentación

Envase que contiene 01 jeringa de 3 g.

Composición

Metacrilato de hidroxietilo fosfatado, Bis-GMA, TegDMA, TMPTMA, sílice nanométrica silanizada, ionómero de vidrio silanizado, silicato de vidrio flúor-aluminio, alcanforquinona, óxido de titanio y amina.

Instrucciones de Uso

Limpiar la superficie oclusal, localizar fosas y fisuras. Aísle (absoluto o relativo) el lugar a sellar con un dique de goma u otro método adecuado para el aislamiento. Realizar un acondicionamiento ácido en la zona donde se aplicará el producto. Lavar la zona con abundante agua y secar la superficie donde se aplicará el sellador. Dispense el sellador directamente sobre la superficie oclusal a sellar. Si es necesario, utilice un cepillo para extender el sellador, evitando áreas de interferencia oclusal. Fotocure cada superficie sellada durante 20 segundos. Vuelva a evaluar los contactos oclusales.

Advertencias y Precauciones

- La polimerización incompleta del producto o el tiempo excesivo pueden provocar en algunos casos una leve irritación de las encías.
- El producto posee monómeros de metacrilato que pueden provocar reacciones alérgicas o irritación leve en pacientes sensibles a estas sustancias.
- Suspender el uso del producto en caso de reacciones alérgicas.
- **MANTENER EL PRODUCTO EN SU EMBALAJE SIEMPRE CERRADO.**
- **PROTEGER DE LA LUZ SOLAR DIRECTA.**
- **CONSERVAR EL PRODUCTO A TEMPERATURAS ENTRE 5°C Y 28°C.**



Validez

24 meses desde la fecha de fabricación.

Registro ANVISA

80750429009

Gerente Técnico

José Paulo Rocha Pereira Pinto
CRQ IV - 04365163



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Calle Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contactos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br