

Barreira Gengival Fotopolimerizável

Português

Indicações

DamPro é indicado como substituto do lençol de borracha para a proteção do tecido gengival e nos casos de risco de irritação por contato com produtos utilizados no procedimento clínico, como, por exemplo, clareamento dental e como coadjuvante no isolamento absoluto para melhor vedação de um preparo cavitário ou tratamento endodôntico.

Apresentação

Embalagem contendo 01 Seringa de 2g.

Composição

UDMA, HEMA, sílica nanométrica, pigmento azul, caforquinona e amina.

Instruções de Uso

Limpe a área de aplicação. Aplique a barreira gengival na área que deve ser isolada. Faça a fotopolimerização da barreira. Após o trabalho, retire a barreira de forma cuidadosa.

Advertências e Precauções

- Evite aplicar o produto na gengiva do paciente que tenha passado recentemente por algum tipo de procedimento cirúrgico bucal ou que tenha qualquer tipo de irritação gengival.
- A incompleta polimerização do produto ou o tempo excessivo podem levar a uma leve irritação gengival em alguns casos.
- **MANTER O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM SEMPRE FECHADA.**
- **PROTEGER DA INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR DIRETA.**
- **ARMAZENE O PRODUTO EM TEMPERATURAS DE 5°C A 28°C.**
-

Validade

24 meses a partir da data de fabricação.



Registro ANVISA

80750420013

Responsável Técnico

José Paulo Rocha Pereira Pinto
CRQ IV - 04365163



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Rua Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contatos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br

Barrera Gingival Fotopolimerizable

Español

Indicaciones

DamPro está indicado como sustituto de láminas de caucho o gomas para proteger el tejido gingival y en casos de riesgo de irritación por contacto con productos utilizados en procedimientos clínicos, como, por ejemplo, blanqueamientos dentales y como coadyuvante en aislamiento absoluto para sellar mejor una cavidad o tratamiento de endodoncia.

Presentación

Envase que contiene 01 jeringa de 2g.

Composición

UDMA, HEMA, sílice nanométrica, pigmento azul, alcanforquinona y amina.

Instrucciones de Uso

Limpiar el área de aplicación. Aplique la barrera de encías en el área a aislar. Fotopolimerizar la barrera. Después del trabajo, retire con cuidado la barrera.

Advertencias y Precauciones

- Evite aplicar el producto en las encías de pacientes que hayan sido sometidos recientemente a algún tipo de procedimiento quirúrgico bucal o que presenten algún tipo de irritación de encías.
- La polimerización incompleta del producto o el tiempo excesivo pueden provocar en algunos casos una leve irritación de las encías.
- **MANTENER EL PRODUCTO EN SU EMBALAJE SIEMPRE CERRADO.**
- **PROTEGER DE LA LUZ SOLAR DIRECTA.**
- **ALMACENAR EL PRODUCTO A TEMPERATURAS ENTRE 5°C Y 28°C.**

Validez

24 meses desde la fecha de fabricación.

Registro ANVISA

80750420013



Gerente Técnico

José Paulo Rocha Pereira Pinto
CRQ IV - 04365163



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Calle Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contactos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br